

Manual Colchón antiescaras OLES

Principios de funcionamiento

- La presión alterna a un ritmo suficiente evita la compresión vascular prolongada que es probable que cause hipoxia tisular.
- La presión alterna adapta el colchón al paciente y a su posición.

Normas de uso

El método tradicionalmente aceptado de control de dolor de presión es hacer que el paciente cambie las zonas de presión a intervalos frecuentes y observar las áreas de riesgo con regularidad.

El colchón de presión alterna está destinado a complementar este tratamiento. La observación del cliente y el torneado cuando sea necesario deben ser considerados como parte del tratamiento.

General

- Para pacientes que probablemente pasen más de 15 horas al día en la cama.
- Para pacientes que se clasifican como de medio a alto riesgo de desarrollar úlceras por presión.

Instalación / Uso

1. Desenrollar el colchón.
2. Colóquelo sobre la cama.
3. Asegúrelo a la cama con las correas de fijación.
4. Cuelgue el compresor (bomba) al final de la cama (extremo del pie) usando los ganchos.
5. Conecte las tuberías de alimentación del colchón al conector del compresor (bomba) haciendo coincidir las tomas apropiadas.
6. Conecte el cable de alimentación eléctrica al compresor (bomba).
7. Guíelo a lo largo de la cama hasta el enchufe del colchón y conéctelo
8. Presione el interruptor para encender el compresor (bomba).
9. Antes de colocar al paciente en el colchón, espere a que éste esté completamente inflado.
10. Seleccionar la presión correspondiente a la morfología del paciente.



cymam®



cymam®
care



cymam®
sportcare

Medidas de seguridad

- TENGA CUIDADO al manejar este equipo eléctrico.
- NO deje conectado a la alimentación eléctrica cuando no esté en uso.
- NO exponga el equipo a humedad excesiva.
- NO utilice productos de limpieza corrosivos como desengrasantes industriales o disolventes acéticos.
- NO intente reubicar este equipo mientras esté conectado al suministro eléctrico.

Limpieza / Desinfección

Compresor (bomba):

- TENGA PRECAUCIÓN y desconecte del suministro eléctrico antes de proceder a limpiarlo.
- TENGA PRECAUCIÓN y use un paño impregnado con una solución detergente suave.
- TENGA PRECAUCIÓN y siga las instrucciones del fabricante en cuanto a las concentraciones de soluciones utilizadas.
- TENGA PRECAUCIÓN y no exceda las recomendaciones del fabricante al utilizar la solución de limpieza.

Utilice un paño impregnado con una solución de producto detergente o un detergente / desinfectante de superficie con marca CE siguiendo las concentraciones de uso recomendadas por el fabricante y siga los tiempos de resistencia.

Mantenimiento

Las operaciones de mantenimiento del compresor (bomba) deben llevarse a cabo estrictamente por un técnico autorizado por el importador.

Importado por:

EUROPODEX SL.

Licencia nº: 4672 P.S.

Polígono Promosa – Calle W5, Nave 3

33211 Gijón - Asturias – ESPAÑA –

TEL. 985990833 FAX. 985 990263

ventas@europodex.com

www.europodex.com