

Manual Colchón antiescaras ONIS

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

- Fácil de utilizar
- Portátil y ligero
- El colchón esta formado por 130 celdas.

INSTRUCCIONES DE MANEJO:

- 1 Posicionar el compresor en posición horizontal o colgar del gancho.
- 2 Desplegar el colchón sobre la cama. Asegúrelo con las solapas de ajuste. Los tubos de aire deben quedar a los pies de la cama.
- 3 Conectar el tubo alimentador de aire a la salida de aire del colchón y al compresor, asegurando que los tubos no queden retorcidos. Deje espacio para que las barandillas de la cama se puedan mover libremente.
- 4 Enchufar el compresor a la fuente de electricidad y encenderlo. El indicador de encendido deberá ahora iluminarse.
- 5 Esperar 20 minutos hasta que el colchón se hinche completamente.
- 6 Cubrir con una sábana. Colocarla sin ejercer presión, con cuidado.
- 7 Por favor, use el mando de presión regulable para proporcionar una mayor comodidad al paciente.

NORMAS DE LIMPIEZA:

- El colchón puede lavarse con una solución desinfectante.
- No sumerja el compresor en agua.
- No introduzca en autoclave. Garantía para el compresor y el colchón de 1 año.

PELIGRO:

NO usar en presencia de productos inflamables; posible riesgo de explosión.

ADVERTENCIA:

Debido al riesgo de shock eléctrico, desconecte el compresor de la toma de corriente antes de retirar la tapa para cambiar el fusible. Por favor, consulte con su servicio local cualificado para recibir ayuda.

Distribuido por:

EUROPODEX SL.

Licencia nº: 4672 P.S.

Polígono Promosa – Calle W5, Nave 13

33211 Gijón - Asturias – ESPAÑA –

TEL. 985990833 FAX. 985 990263

ventas@europodex.com

www.europodex.com



cymam®



cymam®
care



cymam®
sportcare