

## CINTURÓN ABDOMINAL PARA SILLA / SILLÓN



### DESCRIPCIÓN

El cinturón abdominal de silla / sillón ofrece soluciones a problemas de inestabilidad causados por disminuciones funcionales o funcionales psicológicas.

### MODELO / REFERENCIA

#### SILLA:

305502: Acolchado - Hebillas - 15cm

304300: Acolchado - Magnetico

304310: Acolchado - IronClip

305550: Transpirable- Hebillas - 12cm

305551: Transpirable - Hebillas - 15cm

#### SILLÓN:

305600: Acolchado - Hebillas - 12cm

305601: Acolchado - Hebillas - 15cm

304350: Acolchado - Magnetico

304360: Acolchado - IronClip

305651: Transpirable - Hebillas

### COLORES

Acolchado: Azul marino

Transpirable: Negro

### EFFECTOS Y VENTAJAS

Evita que el paciente se incline, se deslice o sufra una mala postura. Ofreciendo una sujeción firme y cómoda en la zona abdominal con cierre de seguridad en la parte posterior para evitar que el paciente lo abra por sí mismo.

### INDICACIONES DE USO

Para colocar el artículo correctamente, el paciente debe colocarse cómodamente en la silla / sillón y el cinturón debe pasar a través de la zona abdominal apretando las correas de sujeción para ajustarse al contorno de la cintura del paciente, asegurándose de que no haya holgura pero de manera firme.

### MANTENIMIENTO

Basta con lavarla periódicamente a mano o a máquina, a una temperatura máxima de 40°C. Seque horizontalmente y sin fuentes de calor.

### COMPOSICIÓN

Acolchado: 20% Antelina (100% poliéster), 20% Velur (100% poliamida)

Y 60% de espuma.

Transpirable: 100% poliéster

Correas: 100% Polipropileno

