



EUROPODEX
Fabricante nacional e importador
de productos sanitarios ortopédicos
(Nº licencia 4672 P.S.)
www.europodex.com
ventas@europodex.com

Asiento giratorio de bañera Cymam Modelo “Caudal”



Referencia EP AGB01

Introducción

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar esta silla de baño.

Este manual contiene información importante sobre seguridad y consejos sobre el uso y el cuidado adecuados de la silla de baño.

Si tiene alguna consulta o en el caso que el producto esté deteriorado, contacte con su proveedor.

Con la adquisición de este accesorio de asistencia para la ducha, obtiene un producto de primera calidad que le facilitará el aseo. Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse con el manejo y el funcionamiento del accesorio de asistencia para la ducha y así sentirse más seguro.

Esperamos que disfrute de su nuevo producto.





Componentes de la silla de baño


1.- Reposabrazos

2.- Palanca de bloqueo

3.- Base del asiento

4.- Eje de giro

5.- Tornillos de ajuste

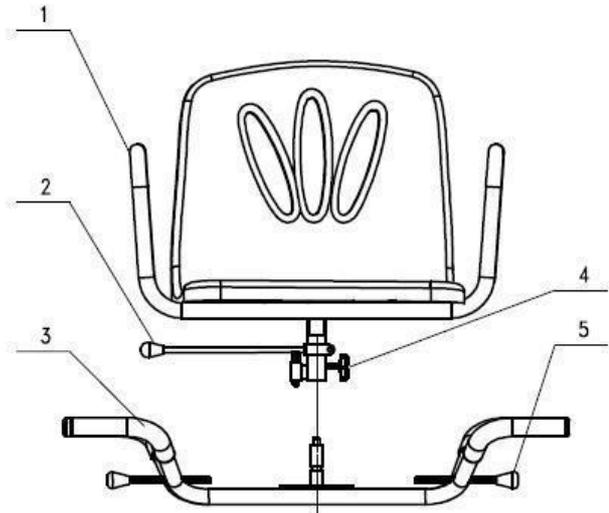

Descripción de los componentes

- Reposabrazos

Los reposabrazos permiten una mayor facilidad de manejo al cuidador. También aportan seguridad al usuario.

- Palanca de bloqueo.

Nos permite bloquear el asiento y girarlo y bloquearlo cada 90º.

- Tornillos de ajuste

Dos tornillos acolchados aseguran el asiento en el interior de la bañera.



EUROPODEX
Fabricante nacional e importador
de productos sanitarios ortopédicos
(Nº licencia 4672 P.S.)
www.europodex.com
ventas@europodex.com

+

Utilización

El asiento giratorio de bañera EP ABG01 “CAUDAL” fabricado en acero inoxidable, es una solución práctica y económica para aquellas personas que experimentan inseguridad o dificultad al utilizar una bañera.

Diseñados para utilizarlos con la ayuda de otra persona que con un mínimo de esfuerzo introducirá las piernas del usuario dentro de la bañera. No requiere obras ni mantenimiento y se puede retirar para dejar libre la bañera.

La seguridad del asiento es muy importante, lleva reposabrazos integrados y una palanca con 4 posiciones que puede bloquear el giro del asiento para mayor seguridad al entrar y salir. El diseño del asiento impide deslizamientos y evacua el agua. Dos tornillos acolchados, aseguran el asiento en el interior de la bañera. El asiento de plástico de alta resistencia, es bio-compatible y fácil de limpiar.

Asegúrese de la correcta colocación de los pernos de retención.
La superficie de asiento solo sirve para sentarse.

Si el embalaje muestra daños en el momento de la entrega, examine la silla en busca de defectos visibles. Si se observa algún desperfecto, póngase en contacto con el distribuidor al que Vd. ha adquirido el producto.

Instrucciones de montaje

Coloque la base del asiento sobre la bañera de manera que las cuatro patas reposen sobre los bordes de la misma. Gire los pomos de los tornillos laterales hasta que queden a unos milímetros de distancia de las paredes de la bañera. No es en absoluto necesario que estos tornillos estén presionando las paredes interiores de la bañera. Coloque el asiento sobre la base del aparato. El cilindro de la base le servirá de guía a este efecto. Pruebe la palanca de freno y compruebe que actúa correctamente. El asiento puede ahora girar 360 grados

Mantenimiento y limpieza

Mantenimiento

Para que su silla de baño esté en perfectas condiciones de uso, debe hacer unas comprobaciones periódicas para asegurarse





EUROPODEX
Fabricante nacional e importador
de productos sanitarios ortopédicos
(Nº licencia 4672 P.S.)
www.europodex.com
ventas@europodex.com

de que los pernos, tuercas y otros componentes se encuentran intactos y apretados, ya que con el uso se pueden aflojar.

Limpieza

Para limpiar la silla de baño, utilice únicamente detergentes suaves. Para limpiar la estructura utilice un trapo suave.

Si la silla de baño va a ser utilizada por otro usuario debe limpiar todas las partes que entraron en contacto con el anterior paciente con algún desinfectante.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

Importado por:

EUROPODEX SL.

Licencia nº: 4672 P.S.

Avenida del Llano nº 57 Gijón

33209 Asturias – ESPAÑA –

TEL. 985990833 FAX. 985 990263

ventas@europodex.com

www.europodex.com

Fabricado por:
CAREMAX REHABILITATION EQUIPMENT CO., LTD
Shugang Rd. Pingnan Industrial Area, Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China

Representante Legal en U.E.:
Lotus Global Co., Ltd

1 Four Seasons Terrace, West Drayton, Middlesex, London, UB7 9GG, United Kingdom

